

SK Návod na použitie

HK respirátorová pumpa pre teľatá #1032

Respiračná pumpa HK od veterinárneho lekára Dr. Brona je vhodná na extrakciu hlienov z úst a nosa novonarodených teliat a na resuscitáciu mláďat obehového systému u obzvlášť obtiažnych pôrodov teliat.

1. Odsávanie hlienu z úst a nosa novonarodených teliat.

Väčšie množstvo hlienu v oblasti úst a nosa môže spôsobiť značné problémy, keď teľa začne dýchať, a môže viesť aj k úmrtiu udusením. Odstránenie hlienu rukou je v tomto prípade úplne nedostatočné. HK respirátorová pumpa je riešením. Priložte gumový náustok na ústa alebo nos miernym tlakom a odsajte prítomný hlien pomocou odsávačky zatiahnutím za hviezdicovú rukoväť. Potom vyberte respirátorovú pumpu HK a tlakom na hviezdicovú rukoväť zatlačte piest vo vnútri respiračnej pumpy HK dole a odsatý hlien vytečie von. Tento postup opakujte podľa vlastného uváženia niekoľkokrát, pokiaľ nebude odsatá väčšina hlienu.

2. Rýchla resuscitácia obehového systému u obzvlášť ťažkých prípadov pôrodov teliat.

Proces pôrodu predstavuje veľkú záťaž pre matku aj teľa. Pri ťažkých pôdoch, spôsobených slabými kontrakciami, nesprávnou polohou plodu alebo príliš veľkým teľaťom, je potrebné zaistiť rýchlu a účinnú resuscitáciu a tlak na hrudný kôš, ktorý má rozhodujúci význam pre ďalší vývoj. Vývoj pľúc a normálny začiatok dýchania môžete podporiť použitím resuscitačnej pumpy HK. Pre resuscitáciu sa zatiahne hviezdicová rukoväť na maximum. Gumový náustok sa potom umiestni na nos alebo ústa a hviezdicová rukoväť sa pomaly stlačí dole. Tento postup opakujte podľa vlastného uváženia.

Dôležité upozornenie: Respiračnú pumpu HK je potrebné po každom použití starostlivo vyčistiť a vydezinfikovať. Uchovávajte ju na čistom a suchom mieste. Záruku poskytujeme v súlade s našimi všeobecnými záručnými podmienkami.